

Istruzioni di montaggio visiera protettiva

Dettagli su ingredienti e file di risorse:

<https://code.electrolab.fr/covid-19/visiere>


Pezzo 1 : Fascia foglia

Pezzo 2 : Fascia testa



1 Montaggio della visiera sulla fascia esterna


La visiera dev'essere prima forata in quattro punti con una pinza fustellatrice (modello A4 con buchi ogni 8 cm).

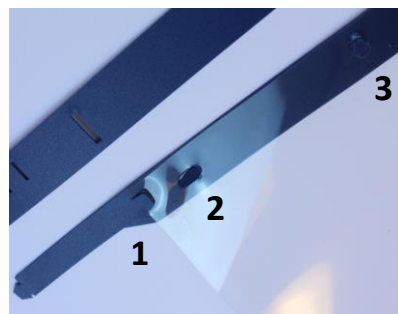


1. Posizionare la visiera in corrispondenza delle 4 linguette (2) poi (3), (4) e (5) della fascetta e incastrare i due pezzi con movimento "a slitta".
2. Fissare infine i bordi esterni (1) (6) della visiera alle due linguette terminali.



2 Montaggio dell'elastico sulla fascia interna

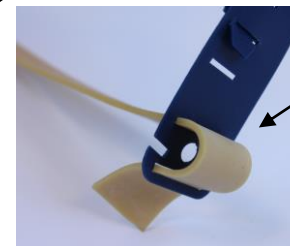


1. Prendere u' estremità dell'elastico ed inserirlo dentro la tacca (2) poi dentro la tacca (1).
2. Fare lo stesso sull'altro lato.


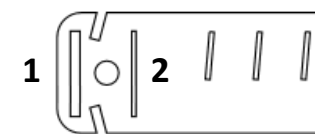


Suggerimento 1: in mancanza di un laccio elastico, sono possibili soluzioni alternative:

- fascia da cucito da fissare al foro (3) con nodo.
- elastico classico da passare nel foro (3) e fissare alle tacche di fissaggio (4) (5).

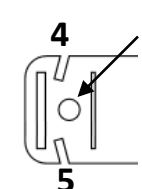


3 Montaggio delle due fascette

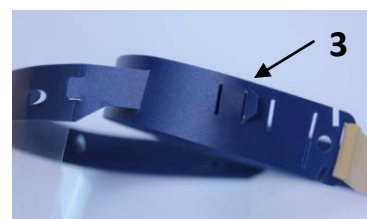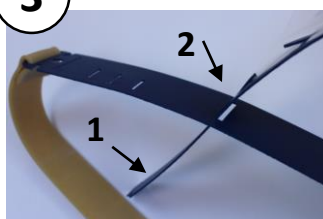


1. Inserire la linguetta (1) nella tacca (2), quindi l'estremità della linguetta (1) nella tacca (3)
2. seguire la stessa sequenza al contrario sull'altra estremità della fascetta..

Suggerimento 2: è possibile regolare la profondità della visiera utilizzando le altre 2 tacche (3) disponibili.

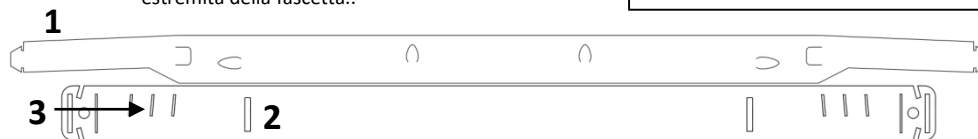

4 La visiera di protezione è pronta all'uso

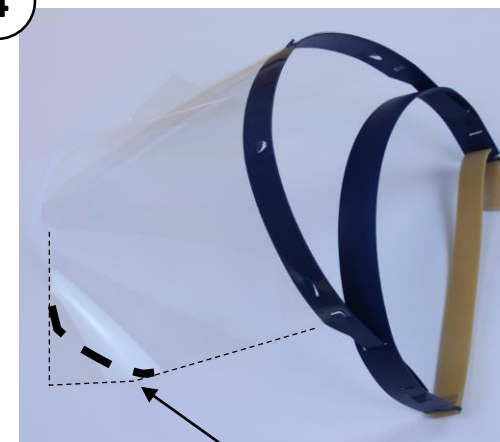

Suggerimento 3: è possibile regolare la tensione...



Per vedere gli files del progetto

Suggerimento 4: è possibile tagliare gli angoli del foglio trasparente in una forma arrotondata.