



Montageanleitung Schutzvisiere

Informationen zu den Werkstoffen und den Urdateien:


<https://code.electrolab.fr/covid-19/visiere>

Teil 1 : Blattband
Teil 2 : Kopfband



Montage des Blattbandes und der Folie

1

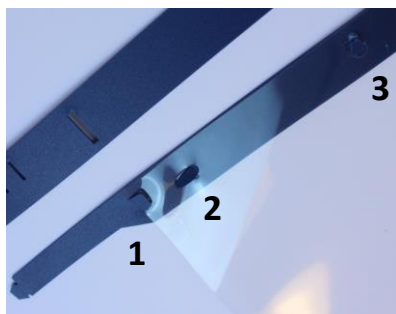


1. Anhand eines A4-Lochers die kurze Seite der Folie mit vier Löchern versehen.
2. Halterungstifte (2), (3), (4) und (5) in die Löcher der Folie einführen.
3. Folienränder an die Halterungstifte (1) und (6) festmachen.




Montage des Kopfbandes und des Gummibandes

2

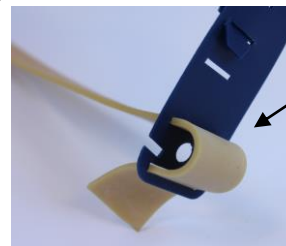


1. Ein Ende des Gummibandes in die Nut (2) und dann in die Nut (1) einführen.
2. Schritt #1 auf der anderen Seite wiederholen.

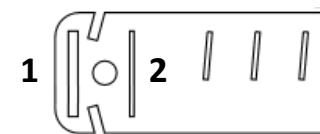



Tipp 1 : Sie haben kein Venenstauergummiband ?
Das Design ist auch mit anderen Bändern verwendbar .

- Elastisches Band (aus dem Nähkasten): Durch das Loch (3) einfädeln und dann zuknoten.
- Klassisches Gummiband: Durch das Loch (3) einführen und an den Nuten (4) und (5) festmachen.

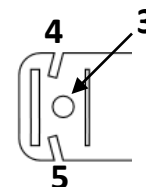

Montage der zwei Bänder


3

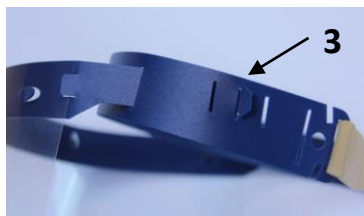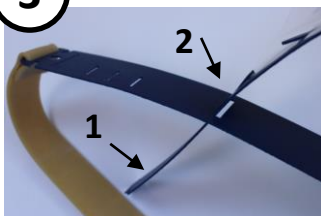

1. Die Lasche (1) in die Nut (2) und schließlich in die Nut (3) einführen.


2. Schritt #1 auf der anderen Seite wiederholen.

Tipp 2 Die Tiefe der Visiere kann anhand der zwei weiteren Nuten (3) angepasst werden.

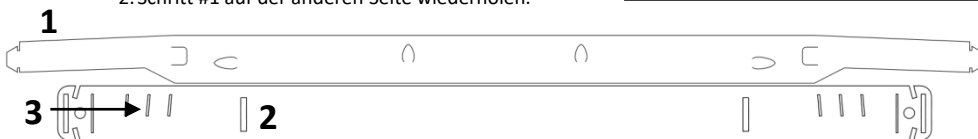

Ihre Schutzvisiere ist zur Anwendung bereit

4

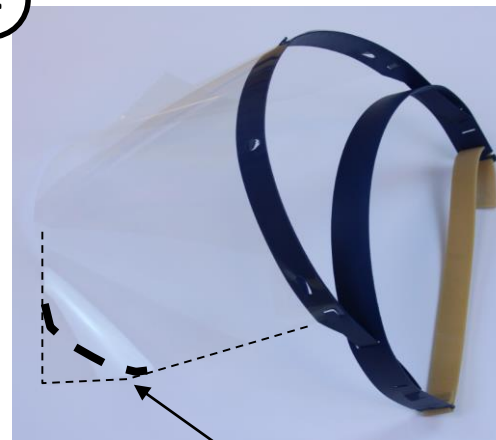

Tipp 3 : Hier können Sie die Visiere lockerer oder fester machen.



Zu den Blaupausen

Tipp 4 : Die Kanten der Visiere können Sie abrunden.